

**1. CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:**

- a. Gebe takip odaları.

**2. SORUMLULAR**

- a. Tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları

**3. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

- a. Pille çalışan seyyar el cihazıdır.  
b. Kullanımı ve taşınması sırasında düşmemesine dikkat edilmelidir.

**4. KULLANIMI**

- a. Gebenin karnından bebeğin ÇKS si bulunarak ÇKS sayısı tespit edilir.(jel kullanılır)

**5. BAKIMI**

- a. Jel temizliği yapılarak bir sonraki hasta için hazır edilir.

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAYLAYAN</b>
Dr. Necla ATICI ÖZTÜRK		Dr. Ahmet ÜREMEN Yönetici Hekim