

1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- ✓ Laboratuvar.

2.0 SORUMLULAR

- ✓ Dr. Demet Başak ÖZAL, Hemşire Gülten AKGÜL

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- ✓ Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilmelidir.Bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerji verilir.
- ✓ Kullanımı sırasında cihaz çalışırken kapak açılmaya çalışılmamalıdır.
- ✓ Cihaza yükleme dengeli olmalıdır.

4.0 KULLANIMI

- ✓ Cihaz çalışılan ürüne göre programlanır(cihazın hızı,santrifüj süresi).
- ✓ Kılcal tüpler godelere karşılıklı dengelenerek yerleştirilir.
- ✓ Kılcal tüplerin üzerindeki koruyucu kapak kapatılır.
- ✓ Santrifüj kapağı kapatılır.START düğmesine basılır.
- ✓ Süre bitiminde santrifüj kapağı açılır.Tüpler dikkatlice çıkartılır.

5.0 BAKIMI

- ✓ Cihazın genel temizliği günlük yapılır. Cihazın genel bakımı yılda bir defa yapılır.

6.0 DEĞİŞİKLİKLER

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN
Dr. Necla ATICI ÖZTÜRK		Dr. Ahmet ÜREMEN Yönetici Hekim